

ALLEX

施術者と患者の負担を軽減する

ギプス カッターR

Gypsum
Cutter R



綿包帯・キャストが
重ねた状態でも
単独でも
よく切れる

手動式
だから
患者も安心

フックで
すっきり収納

ギプスが
4枚重ねで
切れる

ギプスカッターRは、
ギプス包帯を下巻材とともに切断が可能です。
4枚重ねまでのギプスの切断が可能であり、
ギプス包帯、下巻材、
それぞれ単独でも切断ができます。

切れ味の良い

ハイカーボステンレス鋼を使用。



刀身は切れ味がよく長持ちするハイカーボステンレス鋼を使用し、表面はサビに強い電解研磨加工が施してあります。
また、先端や側面は丸みを帯びており、作業時に患者の皮膚の損傷を防止します。

4つの鉤と大きなハンドル（フック付き）で
容易に切断が可能。



支点に4つの鉤を使用することでテコの原理を利用し、軽い力で切断が可能。また、握りやすい大きなハンドルと開閉が楽なバネがついており、両手での使用も可能です。
使わない時は、フックですっきり収納できます。



特徴
1

特殊構造のため、**4枚重ね**までのギプスを切ることが可能です。

特徴
2

手動式ギプスカッターのため、患者に**不安感を与えません**。

特徴
3

「キャスト綿包帯を重ねた状態」及び「それぞれ**単独**」でも切ることが可能です。

特徴
4



使わない時はフックですっきり収納。



使用上の注意

- 左右に振りながら切らないでください。切断対象物と垂直に切り進むことをお奨めします。
- かしめ鋺(ネジ)を締めたり、緩めたりしないでください。開閉不具合、切れ味不具合、破損などの原因になります。
- 横方向にこじらないでください。刃欠けの原因になります。
- 滅菌器非対応です。加熱殺菌処理は行わないでください。
- ガラス繊維や石膏のギプスには使用できません。
- サビ防止のため、ご使用後は汚れを拭き取り、鋺や可動部に油をつけて保管することをお奨めします。
- 表示用途以外のことには使用すると、切れ味不具合、破損などの原因になります。
- 非絶縁ですので、通電しているものには使用しないでください。
- 刃物ですので取り扱いには十分にご注意いただくとともに、刃先を人や自分に向けたり、振り回したりしないでください。

ALLEX
アレックス

林刃物株式会社
HAYASHI CUTLERY CO., LTD.

〒501-3246 岐阜県関市緑ヶ丘2丁目3番7号
TEL: 0575-22-3344 (代) FAX: 0575-22-9810
E-mail: hamono@allex-japan.com
URL: <http://www.allex-japan.com>